

ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Модель коляски	Кресло-коляска для инвалидов Oronica Base 145
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	«Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко.Лтд», Китай, Zhenjiang Assure Medical Equipment Co. Ltd., No. 297, Chuqiao Road, 212009 zhenjiang City, Jiangsu Province, People`s Republic of China
Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)	ООО «Ортоника»
Регистрационный номер медицинского изделия	РЗН 2013/468 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932311)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52




ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Кресло-коляска для инвалидов Oronica Base 145
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период покупатель может обратиться к продавцу для ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.



-  ortonica.ru
-  service@ortonica.ru
-  8 (800) 707-44-52



КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ORTONICA **BASE 145**



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Инвалидная коляска Ortonica Base 145 ° рычажным управлением может использоваться в качестве комнатной или прогулочной.

КОНСТРУКЦИЯ

- Регулируемые по высоте рычаги управления
- Рычажный привод на задние колеса
- Подлокотники несъемные
- Рама стальная, с порошковым покрытием
- Спинка и сиденье изготовлены из водоотталкивающего материала
- Съемные подножки
- Откидные опоры для стоп
- Складывается и раскладывается без помощи инструментов
- Колеса задние, пневматические
- Колеса передние, пневматические
- Карман на спинке сиденья
- Ручной стояночный тормоз

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая высота /мм	970-1190	
Общая длина/мм	1120-1170	
Общая ширина/мм	Варианты исполнения	
	670	720
Высота спинки/мм	360	
Угол наклона спинки	90°	
Ширина сиденья /мм	Варианты исполнения	
	430	480
Глубина сиденья/мм	430	
Материал рамы	Сталь	
Ремни безопасности	Нет	
Вес коляски/кг	Варианты исполнения	
	26,5	27
Грузоподъемность/кг	130	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-коляска Ortonica – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами. ~ избежание поломки или опрокидывания коляски, запрещается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении. Запрещается использовать коляску с неисправными тормозами.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Коляска складывается и раскладывается без инструмента: для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально. Для складывания коляски необходимо поднять опоры для ног в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи
- Металлические поверхности протирать насухо
- Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой
- Один раз в месяц необходимо произвести:
 - проверку исправности тормозных механизмов;
 - проверку затяжки резьбовых соединений;
 - проверку давления в шинах колес.
- Один раз в 6 месяцев необходимо произвести смазку подшипников

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- перемещение в коляске на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т. п.